


1

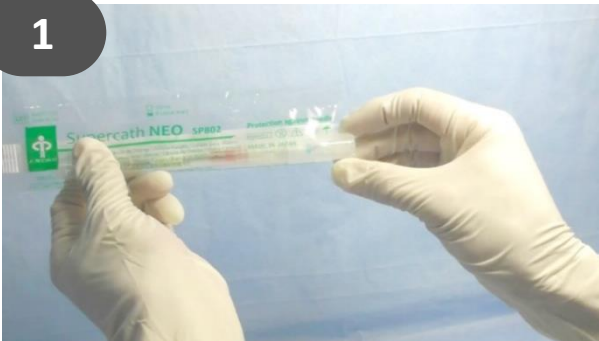


Nehmen Sie den Supercath™ NEO heraus.

2




Entfernen Sie den Protektor und achten Sie darauf, dass die Nadelspitze nicht beschädigt wird.

3

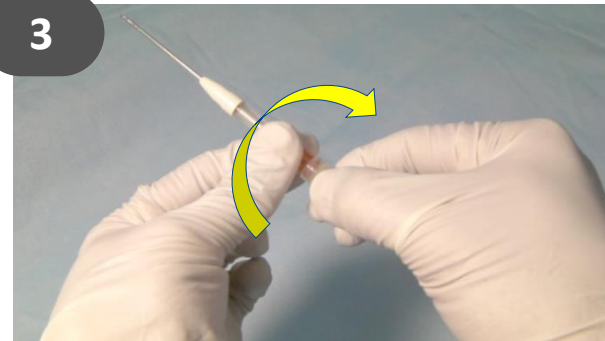


Halten Sie den Luer-Konnektor und überprüfen Sie, ob der Gummi-Adapter und der Luer-Konnektor fest eingerastet sind.

4

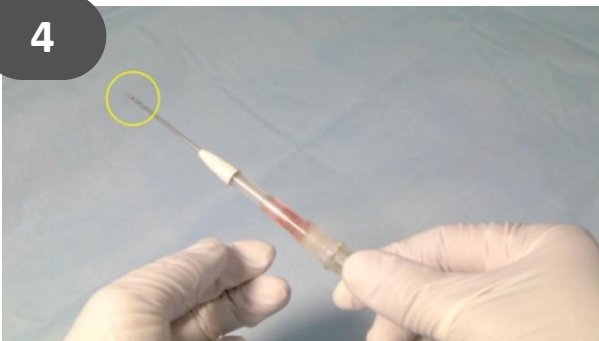


Überprüfen Sie den Zustand der Nadelspitze.

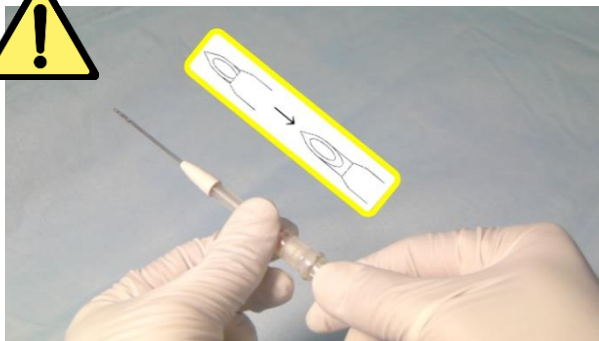

Falls der Katheterschlauch die Nadelspitze bedeckt, ziehen Sie den Gummi-Adapter zurück bis er die Nadelnabe berührt.

5

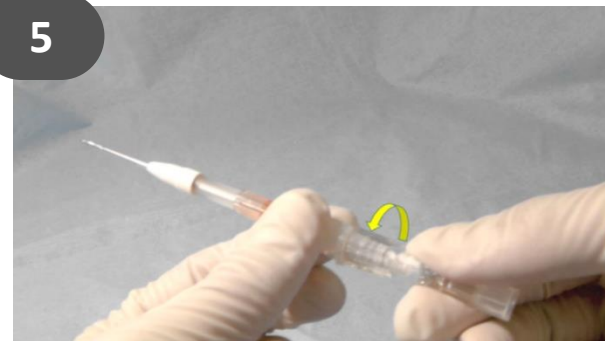

Bewegen Sie die Nabe gegen den Uhrzeigersinn, um etwaige Haftung zwischen der Inneren Nadel und der Äußeren Nadel zu entfernen.

6



Halten Sie die Nabe so, dass die Klinge der Inneren Nadel nach oben zeigt. Lokalisieren Sie das zu punktierende Blutgefäß und punktieren Sie es durch die Haut.

7



Prüfen Sie den Blutrückfluss in die Nabe und führen Sie den Katheterschlauch bis zur benötigten Tiefe in das Blutgefäß ein.

8



Halten Sie den Gummi-Adapter mit einer Hand. Ergreifen und ziehen Sie die Nabe mit der anderen Hand heraus bis die Spitze der Inneren Nadel sich im Luer Konnektor befindet.

9



Halten Sie die Mitte des Klemmschlauchs geschlossen, um einen etwaigen Blutaustritt zu verhindern, und ziehen Sie dann die Innere Nadel heraus.

10



Halten Sie weiterhin den Klemmschlauch geschlossen und entfernen Sie den Gummi-Adapter.

11



Lockern Sie vorsichtig den Druck auf den Klemmschlauch, um die Luft aus der Äußeren Nadel abzulassen.

12



Verbinden Sie den Konnektor des Blutschlauchs mit dem Luer-Konnektor und ziehen Sie die Sicherungsmutter an.

13



Fixieren Sie die Äußere Nadel und den Blutschlauch mit Klebeband.  
✂ Bitte folgen Sie den Vorgaben Ihrer Einrichtung.



## MEDIKIT

MEDIKIT EUROPE GMBH

Gerbermuehlstraße 7  
60594 Frankfurt am Main  
www.medikit-europe.de

Hersteller: Togo Medikit Co., Ltd.